
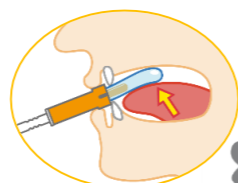


## 基本操作方法

各部位を接続して電源を入れる

バルーンを口に入れる

バルーンを押し潰す

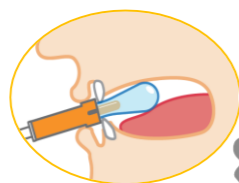

## 規格一覧



### ペコジーな スターターキット

- 入数 1セット/箱
- 定価 31,500円/箱(税抜)
- 内容 ペコジーな 本体1台、舌圧プローブ 3本、接続チューブ1本、単四形アルカリ乾電池 2本、巾着袋 1袋、取扱説明書 1部、クイックマニュアル 1部



### ペコジーな 舌圧プローブ

- 入数 10本/箱
- 定価 3,150円/箱(税抜)



### ペコジーな 接続チューブ

- 入数 5本/箱
- 定価 6,300円/箱(税抜)

注) 本品は、医療機器ではありません

## 仕様一覧

型式	PCG-02	
使用電源	単四形アルカリ乾電池 × 2	
連続使用時間	約16時間(新品の乾電池を使用した場合)	
寸法	74(W) × 118(L) × 28(H)mm	
表示機能	舌圧レベル	1、2、3
	ペコばんだレベル	SS、S、MS、M、MH、H
	レベルサイン	バーグラフ
通信	Bluetooth® Ver.4.1 (Bluetooth Low Energy) WSP	
付属品	舌圧プローブ 3本 接続チューブ 1本 乾電池(単四形アルカリ乾電池 × 2) 1セット 収納ケース(巾着袋) 1袋 取扱説明書 品質保証書付 1部 クイックマニュアル 1部	
オプション	舌トレアプリ	

\* 仕様及び外観は改良の為、予告なく変更することがあります。\* 掲載情報と価格は、2024年7月現在のものです。

## 専用アプリ(無料)

アプリ名	舌トレアプリ
対応OS	iOS(11,12,13,14,15,16,17) / Android(8,9,10,11,12,13,14)
言語	日本語
容量	90.7MB (iOS) / 70MB (Android)

\* OS対応状況の最新情報は、<https://pecogina.jms.cc> をご覧ください。

・ペコジーな、Orarizeロゴ、オーラライズ、ペコばんだは、株式会社ジェイ・エム・エスの登録商標です。  
・iOSは、米国その他の国や地域におけるCisco System, Inc. および/またはその関連会社の商標または登録商標です。  
・Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。

## お問合せ先

販売業者  
株式会社ジェイ・エム・エス  
広島市中区加古町12番17号

カスタマーサポートセンター  
フリーコール  
0120-923-107



ペコジーな特設サイトはこちら  
<https://pecogina.jms.cc>

2023.09.01XA241-JMS  
2024.07.01XA241-RA

# JMS

人と医療のあいだに...

## 舌圧トレーニング機器

# ペコジーな



**Orarize**  
オーラライズ

舌圧トレーニングゲーム対応



# ペコビーなは、舌のチカラを鍛え続けたいくなる！

## ■ ノーマルモード

表示画面を見ながら、舌のトレーニングを行います。


【表示画面】

舌圧レベル  
舌圧レベルを3段階で表示し、舌圧が高いほど数値が大きくなります。

レベルサイン  
舌圧レベルの変化を10段階で表示します。

ペコぱんだレベル  
舌圧トレーニングに適したペコぱんだを表示します。

# 口腔機能向上をサポートするデバイスです。

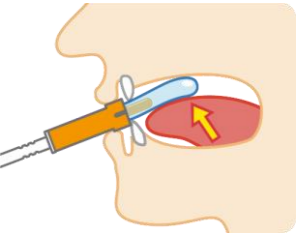

## ■ ゲームモード

専用アプリで遊びながら、舌のトレーニングを行います。

ON  
ゲームスイッチを上にあげる。

中止 釣果03匹 残り44秒

もっと強く!

App Store からダウンロード

Google Play 手に入れよう

\*Appleロゴ、App Storeは、米国その他の国や地域で登録されたApple Inc.の商標です。  
\*Android、Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。

## トレーニングメニュー①舌の筋力アップ

**目標レベル\*1**

- 舌圧レベル=3
- ペコぱんだレベル=H

しっかり舌圧プローブを押し潰す！

**7秒間 × 3セット**

\*1) 目標レベルは個人によって異なります。最大のチカラで潰せるところで7秒間押し潰し続けて下さい。

## トレーニングメニュー②舌の筋持久力アップ

**目標レベル\*2**

- 舌圧レベル=2
- ペコぱんだレベル=S

ゆっくり舌圧プローブを押し潰す！

**10回 × 3セット**

\*2) 目標レベルは個人によって異なります。無理のないチカラで潰せるレベルで押し潰して下さい。

**下駄飛ばしゲーム**

- ペコビーなの舌圧プローブを押し潰すと 下駄が飛んでいきます。
- 成績順のランキングを表示します。

筋力アップ

始める  
ランキング  
遊び方  
設定  
ゲーム選択へ

中止

飛距離 2.6m

飛距離 2m

今回の結果 **60.2m**  
最高記録: 60.2m

中止 次へ

**釣りゲーム**

- ペコビーなの舌圧プローブを押し潰すと、「アジ」、「カツオ」、「タイ」の3種類の釣りが楽しめます。
- 制限時間を設定してトレーニングする事ができます。
- 成績順のランキングを表示します。

筋持久力アップ

始める  
ランキング  
遊び方  
設定  
ゲーム選択へ

中止

中止 釣果03匹 残り46秒

中止 釣果01匹 残り20秒

バルーンを押しつぶしてください。

釣れました！バルーンから力を抜いてください。