

基本操作方法

各部位を接続して電源を入れる

バルーンを口に入れる

バルーンを押し潰す

規格一覧

品名	品番	JANコード	定価(税別)	梱包単位
ペコジーな スターターキット	JF-PCG3	4987494379996	33,000円/箱	1セット/箱
ペコジーな 舌圧プローブ	JF-PCGP2	4987494379897	2,500円/箱	25本/箱
ペコジーな 連結チューブ	JF-PCGT2	4987494379903	6,300円/箱	5本/箱

注) 本品は、医療機器ではありません

仕様一覧

型式	PCG-02		
使用電源	単四形アルカリ乾電池 × 2		
連続使用時間	約16時間（新品の乾電池を使用した場合）		
寸法	74(W) × 118(L) × 28(H)mm		
表示機能	舌圧レベル	1、2、3	
	ペコぱんだレベル	SS、S、MS、M、MH、H	
	レベルサイン	バーグラフ	
通信	Bluetooth® Ver.4.1（Bluetooth Low Energy）WSP		
付属品	舌圧プローブ 3本 連結チューブ 1本 乾電池（単四形アルカリ乾電池 × 2） 1セット 収納ケース（巾着袋） 1袋 取扱説明書 品質保証書付 1部 クイックマニュアル 1部		
オプション	舌トレアプリ		

* 仕様及び外観は改良の為、予告なく変更することがあります。* 掲載情報と価格は、2025年5月現在のものです。

専用アプリ(無料)

アプリ名	舌トレアプリ
対応OS	iOS(11,12,13,14,15,16,17) / Android(8,9,10,11,12,13,14)
言語	日本語
容量	90.7MB (iOS) / 70MB (Android)

* OS対応状況の最新情報は、<https://pecogina.jms.cc> をご覧ください。



ペコジーな特設サイトはこちら
<https://pecogina.jms.cc>

お問合せ先

販売業者
株式会社ジェイ・エム・エス
広島市中区加古町12番17号

カスタマーサポートセンター
 0120-923-107

2023.09.01XA241-JMS
2025.04.01XA241-RA



舌圧トレーニング機器

ペコジーな



舌圧トレーニングゲーム対応




ペコジーなは、舌のチカラを鍛え続けたいくなる！

■ ノーマルモード

表示画面を見ながら、舌のトレーニングを行います。



【表示画面】

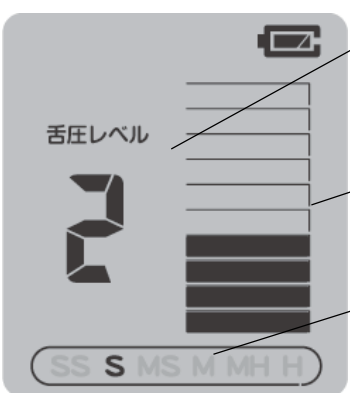

- 舌圧レベル
舌圧レベルを3段階で表示し、舌圧が高いほど数値が大きくなります。
- レベルサイン
舌圧レベルの変化を10段階で表示します。
- ペコぱんだレベル
舌圧トレーニングに適したペコぱんだを表示します。

口腔機能向上をサポートするデバイスです。



■ ゲームモード

専用アプリで遊びながら、舌のトレーニングを行います。





・Appleロゴ、App Storeは、米国その他の国や地域で登録されたApple Inc.の商標です。
・Android、Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。

トレーニングメニュー①舌の筋力アップ

目標レベル*1

- ・舌圧レベル=3
- ・ペコぱんだレベル=H



しっかり 舌圧プローブを押し潰す！

7 秒間 × 3 セット

*1) 目標レベルは個人によって異なります。最大のチカラで潰せるところで7秒間押し潰し続けて下さい。

トレーニングメニュー②舌の筋持久力アップ

目標レベル*2

- ・舌圧レベル=2
- ・ペコぱんだレベル=S





ゆっくり 舌圧プローブを押し潰す！

10 回 × 3 セット

*2) 目標レベルは個人によって異なります。無理のないチカラで潰せるレベルで押し潰して下さい。



- ・ペコジーなの舌圧プローブを押し潰すと 下駄が飛んでいきます。
- ・成績順のランキングを表示します。

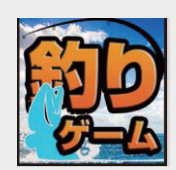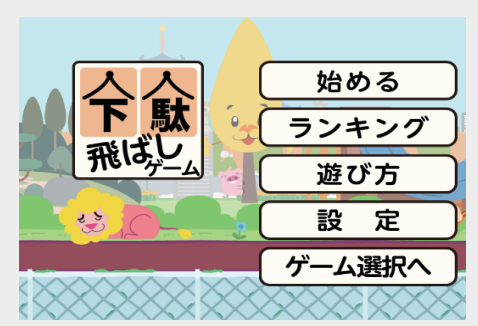

- ・ペコジーなの舌圧プローブを押し潰すと、「アジ」、「カツオ」、「タイ」の3種類の釣りが楽しめます。
- ・制限時間を設定してトレーニングする事ができます。
- ・成績順のランキングを表示します。

